

주의 · 집중력 솔루션

SMARTDREAM



사용방법
영상링크

사용방법

- 1 이마를 깨끗이 닦아주세요.**
로션이나 오일이 남아 있으면 자극이 약해질 수 있으므로, 피부가 완전히 마른 상태로 준비합니다.
- 2 패치를 붙이세요.**
포장에서 꺼낸 패치의 보호 필름을 제거하고, 눈썹 바로 위 이마 중앙에 부착합니다.
- 3 패치와 본체를 케이블로 연결한 후, 전원을 켜주세요.**
케이블을 귀 뒤로 넘기면 편안하게 사용할 수 있습니다.
전원 버튼을 2~3초간 누른 후, 비밀번호 [2580]을 누릅니다.
- 4 전류 세기를 설정해주세요.**
사용을 시작할 때 전류 세기를 2.0mA로 설정합니다.
자극이 강하게 느껴질 경우 세기를 낮추고, 약할 경우 서서히 높여 사용하세요.
- 5 사용시간을 설정해주세요.**
매일 수면 중 사용을 권장드리며 최소 7시간 이상 사용해 주세요.
낮 시간 동안 공부하거나 낮잠을 잘 때 추가로 사용하시면 더욱 효과적입니다.
- 6 세션이 종료되면 전원을 끄고 패치를 제거해주세요.**
설정된 시간이 끝나면, 전원이 자동으로 꺼집니다.



SMARTDREAM

스마트드림 공식 스토어



스마트드림 공식 카페

